

Instrucciones de uso

VACO[®]diaped PLUS

Introducción

Con VACO[®]diaped Plus tiene a su disposición un concepto terapéutico para el cuidado ortésico del Síndrome del Pie Diabético, con una curación de las ulceraciones del pie diabético muy rápida y que permite, al mismo tiempo, movilizar al paciente lo antes posible. Favorece la curación de las excoiraciones gracias a una distribución regular del peso por medio de un sistema de cojín de vacío que se adapta anatómicamente y por igual a la extremidad sin provocar picos de presión. Una carcasa exterior con estructura circular de reja estabiliza la pierna y el pie y permite reducir de un modo óptimo las fuerzas axiales de la pisada en la planta del pie al caminar. Un diseño de suela adaptado al "Síndrome del Pie Diabético" hace que el pie descanse cómodamente y a la vez que mantenga su estabilidad. De esta manera resulta una imagen de marcha muy fisiológica con una seguridad máxima para el tratamiento.

Estas instrucciones de uso le ayudarán a utilizar el sistema de un modo óptimo. En nuestra página web www.vacodiaped.com encontrará una demostración en vídeo que le enseñará cómodamente su utilización en unos sencillos pasos.

Características del producto

- Sin presión, ajuste rápido y reversible gracias al cojín de vacío
- Posibilidad permanente de acceso para controlar las excoiraciones
- Inmovilización del pie en una postura estable
- Imagen de marcha normal gracias a la suela redondeada
- Totalmente permeable a los rayos X.
- Sirve tanto para el pie derecho como para el izquierdo, en dos tamaños

Indicaciones

- Úlceras plantares
- Pie diabético
- Fracturas del metatarso
- Hallux valgus/Hallux rigidus
- Deformación de la articulación del dedo gordo
- Dedos en martillo o en garra

Advertencias de seguridad

Compruebe que la suela queda fijada firmemente y no camine nunca sin ella - PELIGRO DE DESLIZAMIENTO!

Valor indicativo/número del zapato

Small (Pequeño)	35-39
Standard (Estándar)	39-46

Información adicional

Si tiene más preguntas dirijase a su proveedor o directamente a OPED. También puede visitar nuestra página web:

www.vacodiaped.com

OPED

OPED GmbH
Medizinpark 1
83626 Valley/Oberlaindern
Germany

Fon +49 (0)8024/60 81 82-10
Fax +49 (0)8024/60 81 82-99
mail@oped.de
www.oped.de

OPED España
Antonio Ortopedia S.L.
Camino Albero 28
29649 Mijas Costa/Malaga
Spain

Fon/Fax +34 (0)952 47 04 08
Movil +34 (0)678 94 45 81
opedes@hotmail.com
www.oped.es

Instrucciones de uso

VACO[®]diaped PLUS

Proceso de colocación. Paso I



Guarnición

Carcasa

Abra la válvula del cojín (v. funciones de la válvula) y retire la carcasa anterior. Coloque el pie en el zapato interior y cierre las bandas autoadherentes. Después, coloque el pie con el zapato interior en la carcasa.

Proceso de colocación. Paso II



Coloque la carcasa delantera y cierre las correas. Para un ajuste óptimo, dé algunos pasos.

Proceso de colocación. Paso III

Tire de la anilla de la válvula; de forma al cojín bombeando varias veces. Retire la bomba y cierre el tapón de la válvula. En caso de necesidad apriete las correas.


Funciones de la válvula



Ablandar el cojín de vacío:
Tire de la anilla de la válvula y muévalo a la vez para que el aire pueda entrar




Endurecer el cojín de vacío:
Presione la anilla de la válvula y haga vacío con la bomba - fije el ajuste

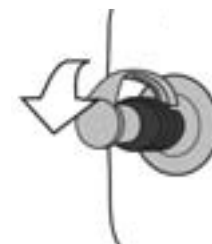

Cerrar el tapón de la válvula:
Asegure el vacío

Colocar el cojín de vacío

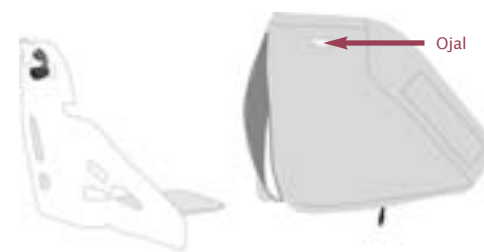


Introduzca el cojín por las cremalleras abiertas en las bolsas laterales de la funda limpia y saque la válvula a través del ojal. Tire de la anilla de la válvula para que pueda entrar el aire y el cojín se ablande (v. Funciones de la válvula). Ahora puede repartir regularmente con la mano el relleno del cojín.

Montar y cambiar la suela




Quitar: Tire a la vez de las dos palancas hacia abajo (1.), a continuación empuje hacia atrás la suela y retírela (2.).

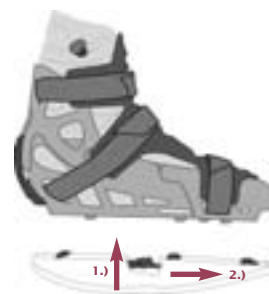

Colocar: Ponga la suela como muestra la ilustración (1.) y a continuación empújela hasta que se oiga como encaja (2.). Compruebe que la suela queda fijada firmemente y no camine nunca sin ella - PELIGRO DE DESLIZAMIENTO!

Cambiar la plantilla

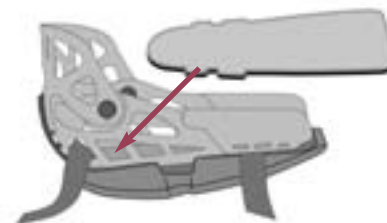

Retire la suela usada.

Coloque la nueva suela con la parte dura y oscura hacia abajo. Compruebe que las pestañas de la suela encajan en los huecos de la carcasa.

Problema y solución

Marcas de presión

Repita de nuevo el proceso de ajuste desde el principio. Reparta uniformemente el relleno del cojín, especialmente donde tenga marcas de presión.

El cojín de vacío está demasiado duro

Tire de la anilla de color de la válvula y muévala a uno lado y al otro para que el aire pueda entrar.

Resulta muy difícil ponerse el cojín

Antes de ponerse el cojín, fije la forma bombeando 6 u 8 veces (véase funciones de la válvula). El cojín ganará en rigidez y le permitirá ponérselo con más facilidad. Después de haberse puesto el cojín, tire de la anilla de la válvula para que pueda entrar aire en el mismo.

No se puede poner la suela

Doble la suela hasta que su superficie de marcha quede doblada ligeramente hacia fuera. Coloque de nuevo la suela.

Limpieza y cuidado

Carcasa y correas

Lavarlas con los zapatos de quirófano o en lavavajillas a 60° (cerrar antes la carcasa con las correas).

Fundas de terciopelo

Son de poliamida y se pueden lavar a máquina a 60°C (cerrar primero las cremalleras) Por razones de higiene cada paciente recibe dos fundas de terciopelo. El cojín de vacío no se puede lavar con la funda. Le rogamos que retire antes el cojín de vacío.

Cojín de vacío

Cada paciente recibe un cojín de vacío nuevo. El cojín puede lavarse con agua jabonosa.

Control de fisuras y roturas

Antes de cada utilización comprobar visualmente si existen fisuras o roturas. En caso de fisuras/roturas o desgaste excesivo, la carcasa debe cambiarse.

Almacenamiento

En un lugar seco y sin polvo; temperatura de 5 a 25°C