

Behandlungswoche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Weber A</b>										
<b>Weber B operativ</b>										
<b>Weber C/ Maisonneuve</b>										
<b>Pilon-Tibial</b>							Belastungssteigerung nach Röntgenbefund			
<b>Calcaneus operativ</b>							Belastungssteigerung nach Röntgenbefund			
<b>Calcaneus konservativ</b>							Belastungssteigerung nach Röntgenbefund			
<b>Metatarsal</b>		VACO-pedes 0° Laufsohle								
<b>Jones Fraktur</b>										
<b>Hallux</b>		VACO-pedes Entlastungssohle								
<b>Arthrodesis USG</b>							Belastungssteigerung nach Röntgenbefund			
<b>Arthrodesis OSG</b>							Belastungssteigerung nach Röntgenbefund			
<b>Achillessehne operativ/konservativ</b>										

Entlastung/Sohlenkontakt  
 Teilbelastung  
 Vollbelastung

Lagerung im VACOsplint  
 Immobilisierung mit 0°, 15° oder 30° Fix-Adapter (dorsal und ventral)

Physiotherapie  
 Beweglichkeit Freigabe OSG mit ROM-Adapter (dorsal und ventral)