

Instrucciones de Uso

Información

VACO[®]ped es un sistema revolucionario de fracturas para el tratamiento de las heridas en piernas y pies. La autoadaptación del cojín de vacío proporciona una estabilización parecida a un molde. El uso de adaptadores permite ajustes de fijación diferentes o rangos de movimiento. VACO[®]ped puede ser usado tanto durante el pre o como en el post operatorio, en casos de reemplazo de molde y/o como órtesis funcional. El bastidor de serie puede actuar de manera preventiva, p.ej. para el tratamiento de rupturas del tendón de Aquiles.

VACO[®]ped ofrece varias posibilidades de adaptación para permitir la máxima comodidad e higiene. Incluso la terapia de agua puede ser una opción durante la rehabilitación mientras que lleva la bota.

Estas instrucciones proporcionan información general en cuanto al manejo del dispositivo VACO[®]ped. La información adicional, incluyendo instrucciones de vídeo, puede encontrarla en la página web: www.vacoped.com

Las características del producto

- Varias posibilidades de inmovilización del tobillo: a 0° (versión estándar de VACOped) y 0°, 15° o 30° en flexión plantar (versión VACOachill)
- Ortesis Funcional que ofrece varias posibilidades de ajuste (gama de movimientos definidos)
- Rápido, presión libre y de aplicación reversible que utiliza la tecnología al vacío
- Fácil acceso para el control de heridas y/o fisioterapia
- Radiografías
- Sirve tanto para el pie derecho como para el izquierdo, en 3 tallas

Posibles problemas

Áreas de presión dolorosas

Repita el proceso de aplicación. Durante el proceso, mientras el cojín de vacío está blando, ajuste el contenido del cojín de vacío lejos del punto de presión.

El cojín de vacío es demasiado duro

Tire de la anilla de la válvula hacia delante y mueva a un lado y al otro para permitir que entre el aire.

La suela no encaja

Con cuidado doble la suela de forma que la superficie que apoya salga por detrás y luego ajústela a la bota (al autoarranque). Compruebe que todos los conectores estén seguros.

La gama de movimientos posibles

El adaptador dorsal 10°-0°-10° se puede usar teniendo en cuenta un rango de ajustes de movimiento entre 10° de flexión plantar y 10° de extensión dorsal. Por lo tanto, el adaptador 0°/15°/30° tiene que transformarse en el adaptador 10°-0°-10°, según las indicaciones de la sección "el Adaptador". No use la cinta delantera para el adaptador 10°-0°-10°.

Limpieza

La carcasa rígida y las correas

Se pueden lavar en el lavavajillas hasta 95° C (-200° F). Por favor, asegúrese de quitar antes el cojín de vacío, la funda y la suela. El sistema de carcasas debería estar cerrado y asegurado con correas.

La Funda interior

Fabricada en algodón, es lavable a máquina hasta 60° (140° F). Cierre primero las etiquetas de velcro). Por razones de higiene, cada paciente ha de tener dos nuevas cubiertas para fundas. Las fundas se usan para un sólo paciente.

El cojín al vacío

El cojín se puede lavar con agua y jabón.

Comprobación de daños

Para comprobar los daños, antes del uso compruebe que el dispositivo no tiene rasguños, agujeros, grietas u otros daños. Si se descubren daños en el dispositivo, la pieza afectada, en su caso, o el sistema entero ha de ser sustituido.

Almacenaje

En un lugar seco, libre de polvo, a una temperatura de 5 ° - 25 °C (41 °F -77 °F).

Tratamiento postoperatorio

Semanas	Posición Conjunta	Peso – porte	Próxima cita
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Tallas (Según Unión Europea)

Pequeña/small (35-39)
Mediana/medium (39-42)
Grande/large (42-46)

Información adicional

Si tiene cualquier pregunta, póngase en contacto con su minorista OPEd en España directamente. También puede visitar nuestra página web:

www.vacoped.com



OPEd GmbH
Medizinpark 1
83626 Valley/Oberlaindern
Germany

Fon +49 (0)8024/60 81 82-10
Fax +49 (0)8024/60 81 82-99
mail@oped.de
www.oped.de

OPEd España
Antonio Ortopedia S.L.
Camino Albero 28
29649 Mijas Costa/Málaga
Spain

Fon/Fax +34 (0)952 47 04 08
Movil +34 (0)678 94 45 81
opedes@hotmail.com
www.oped.es

Instrucciones de Uso

VACO[®]ped
VACO[®]achill

El procedimiento de aplicación (1)



Abra la válvula sobre el cojín de vacío (ver también funciones de válvula) y quite la carcasa frontal. Coloque el pie en el interior de la bota y cierre el velcro. A continuación, introduzca el pie con la bota en el interior de la carcasa.

El procedimiento de aplicación (2)



Coloque la carcasa delantera y cierre las correas según la secuencia recomendada que se muestra en la ilustración. Para un ajuste óptimo, los pacientes que pueden apoyar el pie deberían caminar unos pasos primero y luego reajustar la tensión de las correas.

El procedimiento de aplicación (3)

Enganche la bomba de vacío a la válvula para evacuar el aire. El cojín de vacío se pondrá duro. Quite la bomba y cierre el tapón de la válvula. Compruébelo y si fuese necesario reajuste la tensión de las correas.



Funciones de la válvula




El protector de la válvula se vuelve suave:

Tire de la válvula y luego apriétela suavemente.



Ponga el protector de la válvula en su lugar:

Empuje hacia abajo el borde de la válvula usando la bomba

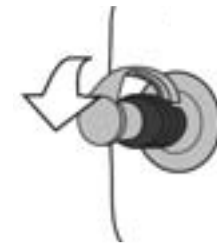


Cierre el tapón de la válvula

Cambiar la Funda




El cojín de vacío se coloca dentro de una funda parecida a una almohada, dentro de un envoltorio. Para retirarla, abra la cremallera de la parte trasera y saque el cojín de vacío. Cuando haya sacado el cojín de vacío de la funda, asegúrese de que todas las partes están colocadas correctamente. La evacuación del cojín de vacío facilitará la inserción. Cierre totalmente la cremallera.

Atar y cambiar la suela

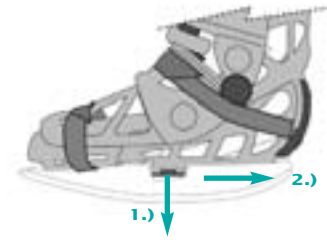


Retirar: Empuje hacia abajo las dos palancas al mismo tiempo para abrir (1) y empuje la suela hacia atrás para extraerla (2).

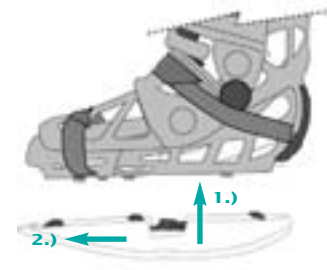


Reemplazar: No empuje las palancas para sustituir la suela. Ponga las lengüetas de plástico levantadas en la suela paralelamente a las ranuras abiertas de la bota. Empuje la suela hacia arriba hasta oír un chasquido. Compruebe que todos los conectores están asegurados.

El Adaptador

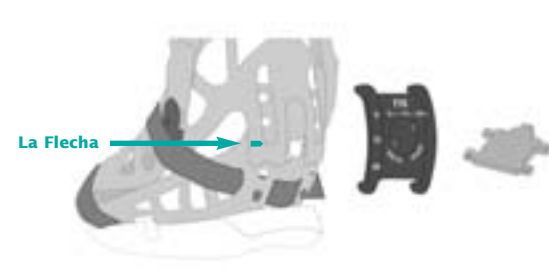

El adaptador de reverso se usa para cambiar la posición de la bota a 0°, 15° o 30°. Cuando el adaptador se coloca en la bota, el número 0° se sitúa en la parte superior y el 30° en la inferior. El tornillo del adaptador presenta dos aperturas para introducir la llave. Gire la llave, colocando la flecha en la posición abierta y retire el adaptador. Ajuste la bota moviendo la parte trasera. Una vez en la posición


correcta, inserte la llave y gire hasta que la flecha del adaptador indique la posición de cerrado. Cuando el adaptador se encuentre en posición neutra o 0° la cinta que se encuentra en la carcasa delantera se puede usar.

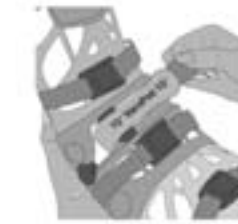

Insertar adaptador frontal (ventral)

- Inserte el adaptador en un lado (la parte superior y el botón al mismo tiempo, ver ilustración)
- Tire del caucho e inserte el otro lado del mismo modo
- Para tener libertad de movimiento en ROM 10°-0°-10° quite el adaptador delantero y no lo sustituya

Uso de la almohadilla de Aquiles (sólo VACOachill)

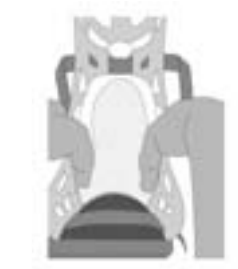

Se recomienda insertar la Almohadilla de Aquiles usando el VACOachill en 30° de flexión en posición plantar. Coloque la Almohadilla de Aquiles en el interior de la carcasa rígida posterior. Deslice la parte superior de la Almohadilla de Aquiles bajo la correa de la bota, luego rompa las capuchas en ese momento.



La espátula de encarte (1)

En los casos de tobillo de mucha gravedad, la espátula crea más espacio en la carcasa dorsal.

- Ate la espátula (como indica la ilustración) a la línea de dirección sobre la carcasa dorsal.
- Presione el centro de la espátula hacia dentro con ambas manos y asegúrese de que la espátula apriete justo en el lugar.



Retirar la espátula (2)

- Presione la espátula que se cierra hacia dentro en uno de los lados con el pulgar, manteniendo el índice y los dedos medios (anular y corazón) en el borde de la espátula
- Repita el mismo procedimiento para el otro lado
- Retire la espátula

Nota: en la EU, la espátula de tobillo se vende por do

Instrucciones importantes de seguridad

Si no puede corregir cualquier dolor, entumecimiento de los dedos del pie o hematoma repitiendo el procedimiento de ajuste, acuda a un doctor inmediatamente. En estas circunstancias se requiere tratamiento médico.

Compruebe siempre que todo el dispositivo se encuentre firme en el lugar indicado para ese uso y no camine nunca sin suela! - PELIGRO DE DESLIZAMIENTO! No camine sin que la carcasa delantera esté cerrada y asegurada con las correas de contorno.

- Se recomienda que los pacientes no conduzcan llevando VACOPed
- Asegúrese de que todas las correas de contorno se encuentran bien apretadas
- Compruebe previamente el dispositivo por si tuviera rasguños, agujeros u otros daños, sobre todo después del lavado. Si sospecha que un dispositivo está dañado, póngase en contacto con su representante OPED en España.